

Sistema de Rayos X Intraoral. Perfecto en su función y diseño

Sistema de Rayos X intraoral VistaIntra



AIRE COMPRIMIDO
ASPIRACIÓN
DIAGNÓSTICO
POR IMAGEN
CONSERVACIÓN DENTAL
HIGIENE

¡Novedad!

La fuente perfecta para los mejores resultados radiográficos



Sistema de radiografiado. Todo de un mismo proveedor

Desde hace casi cinco décadas, odontólogos, clínicas y centros de radiografía aprovechan la experiencia y competencia de Dürer Dental en el ámbito de la radiografía. Nuestra excelente tecnología en lectores de placas, sensores y escáneres para la radiografía digital establece precisamente en materia de calidad de imagen un nuevo estándar.

Con el VistalIntra le ofrecemos ahora también un dispositivo radiográfico de alta calidad para excelentes tomas intraorales. Destaca por su ejemplar ergonomía y está perfectamente adaptado a los lectores de placas de Dürer Dental. De este modo tiene a su disposición -desde la fuente de rayos, pasando por el revelador radiográfico, escáner y los sensores, hasta llegar al software de imágenes- el conocimiento experto y la calidad de Dürer Dental. Un sistema de un solo proveedor que, gracias a la combinación perfecta, garantiza la mejor calidad de imagen.

No importa qué receptores de imágenes utilice: el VistalIntra forma la base para una calidad perfecta de imagen.

Características destacadas:

- Diseño moderno y estilizado para un posicionamiento fácil y preciso
- Sencillo concepto de manejo
- Perfectamente adaptado al lector de placas y el sensor
- Gran fiabilidad y larga vida útil del tubo de rayos X
- Radiación constante
- Valores mA- y kV variablemente regulables
- Generador DC con punto focal de 0,4 mm
- Indicación de la dosis recibida en superficie tras la exposición

Ser los mejores

Deseamos lograr en todo momento lo mejor para nuestros clientes mediante productos excelentes y servicios extraordinarios. Esa es nuestro objetivo en materia de facilidad de uso, fiabilidad y diseño.

Versátil y muy eficiente

Junto con la singular tecnología de placas radiográficas de Dürr Dental, el VistaIntra es sinónimo de radiografías intraorales precisas con una perfecta calidad de imagen. El dispositivo radiográfico VistaIntra también está óptimamente preparado para los sensores radiográficos VistaRay, así como para grabaciones de película.

Resultados de imagen rápidos y de alta calidad

El VistaIntra ya viene preprogramado de fábrica para cada región dental con precisión para la dosis necesaria de radiación de los lectores de placas y sensores de Dürr Dental. De modo que puede utilizarse de inmediato y produce tomas perfectamente iluminadas.



Fácil manejo, gran ergonomía

Gracias al asidero del cabezal radiográfico, el VistaIntra puede posicionarse de un modo cómodo y preciso. También resulta extremadamente fácil la selección de la región dental. En caso necesario, pueden ajustarse de un modo muy preciso los parámetros radiográficos, y también es posible el cambio rápido entre dos ajustes de radiación, p. ej. para el lector de placas y el sensor. Adicionalmente, los símbolos inequívocos del cronómetro mejoran el flujo de trabajo y reducen el margen de error.

Tecnología DC para una dosis mínima de radiación

La moderna tecnología DC del VistaIntra facilita una elevada reproducibilidad de la dosis radiológica y, con ella, una elevada fiabilidad en la calidad de imagen. A la vez reduce la dosis del paciente en más de un 25% en comparación con los generadores AC tradicionales. Esto hace aumentar la seguridad de sus pacientes y empleados.




Instalado de manera precisa con la técnica rectangular/paralela

Junto con el kit de posicionadores de Dürr Dental se logran de un modo sencillo tomas óptimas.




Datos, hechos relevantes y accesorios

VistaIntra DC	
Potencia de entrada	CA 100-240 V 10%, 50/60 Hz
Consumo de potencia (W)	500
Tensión en tubos (kVp)	60-70
Corriente en tubos (mA)	4-7
Longitud de tubo (mm)	200 (300 opcional)
Límites del campo de radiación (mm)	Ø 60 / 30x40 (20x30 opcional)
Tiempo de exposición (seg.)	0,04 - 2
Focal (mm)	0,4 (norma IEC 336)
Filtrado total (mm)	mín. 2,0 Al
Peso (kg)	25
Altura (mm)	1730
Longitud de brazo (mm)	1744 / 1894 / 2194

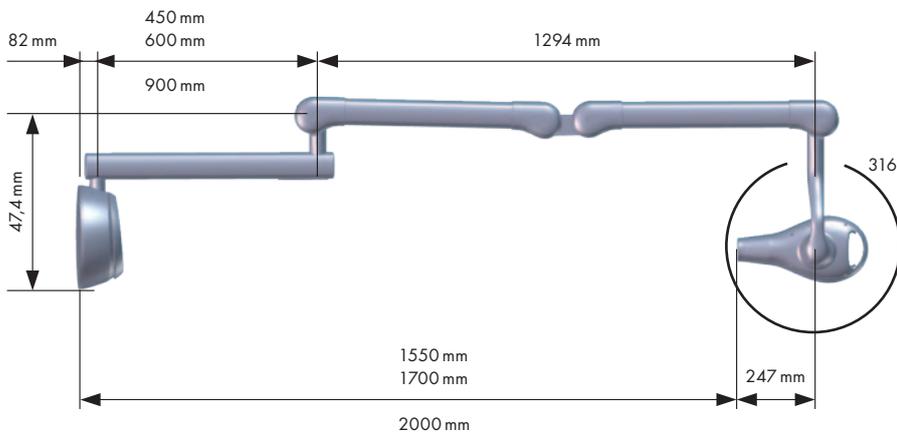

El VistaIntra DC. Ideal para todos los receptores de imágenes

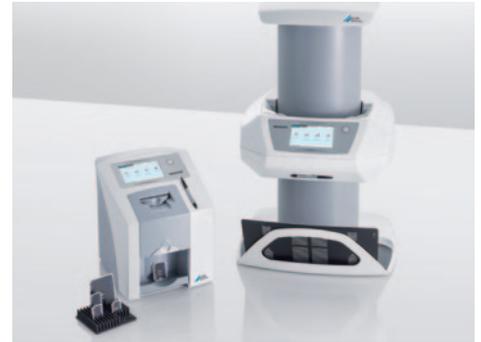

Lector de placas VistaScan



Tecnología sensorial VistaRay



Reveladores de películas radiográficas XR 24 Pro y Periomat Plus

España y Portugal:
 DÜRR DENTAL MEDICS IBERICA S.A.U.
 C/Serra de la Salut, 11 - Nave 6
 Pol. Ind. Santiga
 08210 Barbera del Valles
 Barcelona (España)
 Tel.: +34 (0) 93 718 33 35
 Fax: +34 (0) 93 729 62 32
 www.durr.es
 info@durr.es

